




ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

ENZYDIP - 3 ЕНЗИДИП - 3

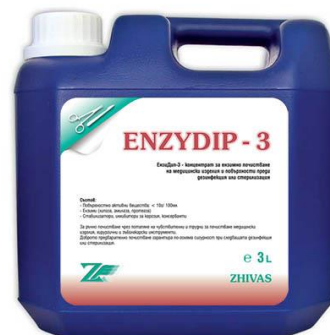

Концентрат за ензимно почистване на медицински инструменти преди дезинфекция или стерилизация

Приложение

ЕнзиДип-3 е предназначен за ръчно почистване на медицински изделия, хирургични и стоматологични инструменти преди дезинфекция или стерилизация.

Свойства

Благодарение на синергичната комбинация от повърхностно-активни вещества и ензими (амилаза, липаза и протеаза) **ЕнзиДип-3** ефективно почиства замърсявания от кръв, остатъчни тъкани, протеини, слюз, екскременти и други върху медицински инструменти и медицински изделия, включително твърди и гъвкави ендоскопи и стоматологични инструменти.

ЕнзиДип-3 се отличава с висока почистваща способност, ниска пенливост, добра извеждаемост, съвместимост с различни материали, като поливинилхлорид, гума, пластмаси, неръждаема стомана, алуминиеви сплави, цветни метали, керамика.

Цвят на концентрата: Бистра светло-кафява течност.
pH 7.4 – 7.9

Състав на препарата

Всеки 100 г ЕнзиДип-3 съдържат:

Активни вещества:

Нейногенни ПАВ < 10 g
Ензими (Липаза, Амилаза, Протеаза) < 20 g

Други съставки:

Консерванти, Хелатни агенти, Парфюмна композиция



ЖИВАС ООД

бул. „Асен Йорданов“ № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

Начин на употреба

Ензидип-3 се доставя като концентрат и се прилага под формата на работни разтвори. В зависимост от степента и вида на замърсяването препаратът може да се използва в различни концентрации. Препоръчително разреждане е от 1:200 до 1:100 с водопроводна вода. Няма изисквания по отношение на твърдостта на водата.

Инструментите се потапят в продължение на 5 – 10 минути във вана с работен разтвор при стайна температура.

Използването на гореща вода до около 40°C за приготвяне на работния разтвор може да съкрати времето за почистване.

Почистването се ускорява чувствително в ултразвукова вана (1 – 3 минути).

Тръби, маркучи, вътрешни пространства трябва да се промият с поток от препарата, като се внимава да не останат празнини и въздушни джобове. Засъхнали замърсявания се отстраняват с по-дълго въздействие или с помощта на четки, гъби и др.

След почистването инструментите се изплакват обилно с водопроводна вода.

Условия на съхранение

Да се съхранява на сухо и проветриво място, в добре затворена оригинална опаковка, далече от пряка слънчева светлина при температура от 0° – 40 °С. Да се пази от достъп на деца.

Предпазни мерки

При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Третиране на отпадъчни количества и опаковки

Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

Опаковка: Туби от 3 l и 5l.

Срок на годност: 2 години

ЖИВАС ООД

1592 София, бул. „Асен Йорданов“ №14
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com

