



ZHIVAS LTD

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

SEPTOQUAT AM MD RFU

(Септокват AM MD готов
разтвор)



ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА РАЗТВОР БЕЗ АЛКОХОЛ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
НА ПОВЪРХНОСТИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

CE 1639

ПРИЛОЖЕНИЕ

Септокват AM MD RFU е предназначен за бърза дезинфекция на повърхности на медицински изделия и повърхности в медицинската област, като маси, матраци, покривала и други предмети.

Тъй като препаратът не съдържа алкохол, той е много подходящ за приложение върху акохол-чувствителни материали, като акрилно стъкло и други.

Септокват AM MD RFU е подходящ за дезинфекция и почистване на кувьози за новородени, ултразвукови вани и множество други медицински изделия.

СВОЙСТВА

Септокват AM MD RFU е базиран на комбинацията на алкиламин, четвъртични амониеви съединения и повърхностноактивни вещества. Той не съдържа алдехиди, феноли и хлор. Препаратът има широк спектър на микробиологична активност при кратко експозиционно време. Органичните замърсявания не намаляват биоцидната му активност.

Септокват AM MD RFU притежава силен почистващ ефект. Той не позволява на органичната материя да засъхне по повърхностите, а формираните водоразтворими протеини се отстраняват лесно.

Външен вид	Безцветна течност
pH (20°C)	9.0 - 10.0

АКТИВНИ СЪСТАВКИ (на 100 g):

Бензалкониев хлорид (CAS 68424-85-1) – 0.40 g
Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS 7173-51-5) – 0.20 g
N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин (CAS 2372-82-9) – 0.24 g



КЛАСИФИКАЦИЯ

Септокват AM MD RFU отговоря на изискванията за химически дезинфектанти на Европейската Директива 93/42/CEE и е класифициран като медицинско изделие - Class IIб.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

Бактерицидно, фунгицидно, микобактерицидно и вирусоцидно действие.

Микробиологична активност	Стандарт	Експозиция
Bactericidal (<i>P.aeruginosa</i> , <i>MRSA</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.hirae</i>)	EN 13727	5 min
Fungicidal (<i>C.albicans</i> , <i>A.niger</i>)	EN 13624	5 min
Virucidal	EN 14476	15 min
Mycobactericidal	EN 14348	60 min

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Септокват AM MD RFU се прилага неразреден. Дезинфекцията се извършва чрез обтриване или опръскване на медицинските изделия или различните повърхности в медицинската област, като се осигури обилно омокряне. Направете необходимото, третираните повърхности да бъдат добре омокрени през цялото експозиционно време.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

В добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре проветрени помещения, при температура t 5° - 30° C.

Предпазни мерки

При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. След контакт с кожата, тя да се измие обилно с вода и сапун. Да не се допуска изпускане на препарата в околната среда.

Опаковка: Флакони от 750 ml и 1000 ml със спрей помпа. Туба от 5 L

Срок на годност: 2 години

ЖИВАС ООД

1592 София, Бул. „Асен Йорданов” №14
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com