



ALDEQUAT+

АЛДЕКВАТ+



Течен концентрат за почистване и дезинфекция на повърхности на базата на алдехиди и ЧАС

Приложение

Алдекват+ е предназначен за ръчно или машинно почистване и дезинфекция на водоустойчиви (пластмасови, метални, керамични, санитарни, стъклени, боядисани, дървени и др.) повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, социални заведения, хотели, козметични и спортни обекти), фармацевтична и козметична промишленост.

Свойства

Алдекват+ е концентрат несъдържащ формалдехид, феноли или свободен хлор. Активните му съставки са биоразградими. Съдържа инхибитори на корозия и различните водоустойчиви материали могат многократно да бъдат третирани без да бъдат увреждани. Притежава широк спектър на гермицидно действие при ниска концентрация на работния разтвор. Лесно разтворим, работните му разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни.

Цвят на концентрата:	син
pH (концентрат)	3.0 - 4.5
pH 1 % воден разтвор	6.5 – 7.0
Плътност	1.065 g/cm ³

Състав на препарата

Всеки 100 g Алдекват+ съдържат:

Активни вещества:

- 0.5 g Глутаров алдехид (CAS 111-30-8)
- 12.0 g Глиоксал (CAS 107-22-2)
- 2.5 g Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS 7173-51-5)
- 5.0 g Бензалкониев хлорид (CAS 68424-85-1)

Други съставки:

Инхибитори на корозия, хелатни агенти, парфюмна композиция



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

Спектър на действие

Бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно и вирусцидно действие (вируси с обвивка) -HBV/HCV/HIV действие.

Микробиологична активност	Концентрация	Метод на изпитване	Експозиция
Бактерицидно действие (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.coli</i> , <i>E.hirae</i> <i>Aspergillus brasiliensis</i>)	0.5%	EN 13697	60 min
Фунгицидно действие (<i>C.albicans</i> , <i>A.niger</i>)	0.5%	EN 13624, EN 1650	30 min
Бактерицидно действие (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.coli</i> , <i>E.hirae</i>)	0.5%	EN 1276	30 min
Бактерицидно действие (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.hirae</i>)	0.5%	EN 13727	30 min
Туберкулоцидно действие (<i>M.terrae</i> , <i>M.avium</i>)	5.0%	EN 14348	120 min
Вирусцидно действие (HBV/HCV/HIV)	0.50 %	EN 14476	30 min

Приготвяне на работни разтвори за дезинфекция на повърхности

Алдекат+ се доставя като концентрат и трябва да се прилага в съответствие с препоръчаните концентрации и време на експозиция (вж. таблицата за дозиране). При приготвяне на работните разтвори използвайте подходящи средства за индивидуална защита.

Използвайте приложената мерителна чашка или други автоматични дозираци устройства за бързо, лесно и удобно приготвяне на работния разтвор. Препаратът се разтваря във вода (при стайна температура), като при дозиране с мерителната чашка, първо съответният работен съд се напълва с вода и после се добавя определеното количество препарат. След кратко разбъркване, препаратът е готов за употреба. Няма изисквания по отношение на твърдостта на водата.

Дезинфекцията се извършва чрез забърсване до пълно омокряне на повърхностите с достатъчно количество разтвор посредством подходящо средство или устройство (машина).

Таблица за дозиране

Обект на дезинфекция	Спектър на действие	Работен разтвор	Експозиция
Почистване и дезинфекция на всякакви непорьозни, водоустойчиви повърхности	Бактерицидно и фунгицидно	0.5 % (50 ml/10 l вода)	60 min
	Вирусцидно	0.50 % (50 ml/10 l)	30 min
	Туберкулоцидно	5% (50 ml/1 l)	120 min

При прилагането на препарата за дезинфекция на повърхности и предмети влизащи в контакт с храни, същите след изтичане на експозиционното време се изплакват с питейна вода.



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

Съвместимост с видове материали:

- **Стъкло и керамика**
- **Метали:** алуминий, неръждаема стомана, мед, месинг, анодизиран алуминий и др.
- **Синтетични материали:** поливинилхлорид, полипропилен, силикон, полиетилен, гума, латекс и др.

Условия на съхранение

Да се пази далеч от достъп на деца. В добре затворена оригинална опаковка, в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температури от 2 до 40° C.

Предпазни мерки

При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При контакт с кожата, тя веднага да се измие обилно с вода и сапун. При поглъщане, да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Третиране на отпадъчни количества и опаковки

Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

Опаковка

Туби от 5 и 10 l и бутилки от 1000 ml

Срок на годност

2 години

ЖИВАС ООД

1592 София, бул. „Асен Йорданов“ №14
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com