



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

ENZYDIP – 3

ЕНЗИДИП – 3



Концентрат за ензимно почистване на инвазивни и неинвазивни медицински инструменти и медицински изделия преди дезинфекция или стерилизация

CE

Приложение

Ензидип-3 е предназначен специално за ръчно почистване на медицински изделия, хирургически и стоматологични инструменти преди дезинфекция или стерилизация.

Свойства

Благодарение на синергичната комбинация от повърхностно-активни вещества и ензими (протеаза, амилаза и липаза) **Ензидип-3** ефективно почиства замърсявания от кръв, остатъчни тъкани, протеини, слюз, екскременти и други върху медицински инструменти и медицински изделия, включително твърди и гъвкави ендоскопи и стоматологични инструменти.

Ензидип-3 се отличава с висока почистваща способност, ниска пенливост, съвместимост с различни материали като неръждаема стомана, алуминиеви сплави, керамика, цветни метали, поливинилхлорид, гума и пластмаса. Той е лесно разтворим и работните му разтвори се приготвят с питейна вода. Твърдостта на водата не влияе на тяхната ефективност.

Външен вид: Бистра светло-кафява течност.
рН 7.4– 7.9

Състав на препарата:

Всеки 100 g ЕнзиДип-3 съдържат:

Активни вещества:

- Нейногенни ПАВ < 10 g
- Ензими (Липаза, Амилаза, Протеаза)

Допълнителни съставки:

Консерванти, хелатни агенти, парфюмна композиция

Класификация:

Ензидип-3 е класифициран като медицинско изделие – Class I .



ЖИВАС ООД

бул. „Асен Йорданов“ № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

Начин на употреба:

ЕнзиДип-3 е концентрат и се прилага разреден с питейна вода, при стайна температура, в концентрации от 0,5 % до 1 % в зависимост от вида и количеството на замърсяването. Почистването се извършва чрез пълно потапяне на инструментите/медицинските изделия в предварително приготвен работен разтвор на продукта и оставяне на предметите за 5-15 минути в зависимост от степента на замърсяване.

Приготвянето на работния разтвор с топла вода 32°C-35°C (температура над 40°C деактивира ензимите) ще съкрати времето за почистване.

Почистването се ускорява чувствително в ултразвукова вана (до 1-3 минути).

Тръби, маркучи, вътрешни пространства трябва да се промият с поток от препарата, като се внимава да не останат празнини и въздушни джобове. Засъхнали замърсявания се отстраняват с по-дълго въздействие или с помощта на четки, гъби и др.

След почистването инструментите се изплакват обилно с питейна вода

Условия на съхранение:

Да се съхранява на сухо и проветриво място, в добре затворена оригинална опаковка, далече от пряка слънчева светлина при температура от 0° – 40 °С. Да не се съхранява в метални съдове.

Предпазни мерки:

При контакт с очите същите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката на етикета.

Третиране на отпадъци и опаковки в съответствие с местните разпоредби:

Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - за изхвърляне на отпадъци и остатъци от празни опаковки виж специалните инструкции в Информационния лист за безопасност.

Опаковка: бутилки (HDPE) от 1 л и туби от 3 и 5 л

Срок на годност: 2 години

ЖИВАС ООД

1592 София, бул. „Асен Йорданов“ №14

Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507

zhivas@techno-link.com;

www.zhivas.com