



# ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23  
[zhivas@techno-link.com](mailto:zhivas@techno-link.com); [www.zhivas.com](http://www.zhivas.com)

## ZHIVASEPT RAPID MD

### ЖИВАСЕПТ РАПИД MD



**За бърза дезинфекция на повърхности на инвазивни и неинвазивни медицински инструменти и медицински изделия**

#### Приложение

CE 1639

Живасепт Рапид MD е готов за употреба препарат на алкохолна основа, предназначен за бърза дезинфекция на повърхности на инвазивни и неинвазивни медицински инструменти и медицински изделия.

Аерозолната форма на препарата позволява лесно третиране на малки и трудно достъпни повърхности на медицинските изделия.

Третираните повърхности и медицински изделия могат да бъдат използвани веднага след изтичане времето на експозиция, без последващо изплакване с вода.

#### Свойства

Живасепт Рапид MD не съдържа алдехиди, феноли и четвъртични амониеви съединения. Представлява балансирана синергично действаща комбинация от алкохоли за постигане на бърза и сигурна дезинфекция. Активните му съставки са биоразградими. Не уврежда устойчиви на алкохол повърхности и е съвместим с различните материали. Препаратът има нисък алергичен потенциал и не оказва дразнещо действие при многократна употреба.

Цвят на препарата: Прозрачна течност с приятен аромат  
pH: 5.0 – 7.0

#### Съставки:

Всеки 100 g Живасепт Рапид MD съдържат:

Активни вещества:

45.0 g Пропан 1-ол (CAS 71-23-8)

30.0 g Пропан 2-ол (CAS 67-63-0)

Други съставки:

Инхибитор на корозия, парфюмна композиция, деминерализирана вода

#### ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА



# ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23  
[zhivas@techno-link.com](mailto:zhivas@techno-link.com); [www.zhivas.com](http://www.zhivas.com)

## Класификация:

Живасепт Рапид MD отговаря на изискванията за химически дезинфектанти на Европейска Директива 93/42 ЕЕС за медицински изделия и е класифициран като медицинско изделие – Class IIb.

## Спектър на действие

Живасепт Рапид MD притежава бактерицидно, микобактерицидно (включително туберкулоцидно), вирусцидно и фунгицидно действие.

Микробиологична активност	Метод на изпитване	Експозиция
Бактерицидно действие ( <i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.hirae</i> )	EN 14561	5 min
	EN 13727	1 min
Фунгицидно действие ( <i>C.albicans</i> ,)	EN 14562	5 min
	EN 13624	1 min
Микобактерицидно действие ( <i>M.terrae</i> , <i>M.avium</i> )	EN 14348 EN 14563	1 min
Вирусцидно действие ( <i>Adenovirus 5</i> , <i>Murimne norovirus</i> , <i>Vaccina virus</i> )	EN 14476	1 min

## Начин на приложение:

Живасепт Рапид MD се прилага без разреждане. Дезинфекцията се извършва чрез напръскване на повърхностите на медицинските инструменти, медицинските изделия и оборудване, посредством спрей помпата на флакона от около 30 см. Време за експозиция 1-5 мин. Почистването на медицинските инструменти преди дезинфекция е препоръчително.

**По време на третиране на медицинските изделия и оборудване, те трябва да са далеч от запалими източници. Да не се прилага върху пропускливи и чувствителни на алкохол повърхности.**

## Предпазни мерки



Сигнална дума: **Внимание**

## Предупреждения за опасност:

H226 – Запалими течности и пари

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

H336 – Може да предизвика сънливост или световъртеж

## Препоръки за безопасност:

P102 - Да се съхранява извън обсега на деца

P210 - Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности.Тютюнопушенето забранено

P305+P351+P338 – При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате

P337+P313-При продължително дразнене на очите потърсете медицински съвет/помощ

P403+P233-Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява на добре проветриво място



# ЖИВАС ООД

бул. „Асен Йорданов“ № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23  
[zhivas@techno-link.com](mailto:zhivas@techno-link.com); [www.zhivas.com](http://www.zhivas.com)

---

**Условия на съхранение:**

В добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре вентилирани помещения, далече от запалителни източници, открит огън и нагревателни прибори, при температура от < 30° С. Да не се излага на пряка слънчева светлина.

**Третиране на отпадъци и опаковки**

Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност.

**Опаковка:** HDPE Флакони от 750 ml и 1000 ml с помпа за разпръскване и туби от 3, 5 и 10 литра.

**Срок на годност:** 3 години

**ЖИВАС ООД**

1592 София, бул. „Асен Йорданов“ №14  
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507  
[zhivas@techno-link.com](mailto:zhivas@techno-link.com)  
[www.zhivas.com](http://www.zhivas.com)