



## УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

# ЦИТРИКАДЕЗ

## Разтвор 20% и разтвор 50%

**ТЕЧЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ,  
ДЕКАЛЦИФИКАЦИЯ И ТОПЛИННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА  
ХЕМОДИАЛИЗНИ МАШИНИ**



CE 1639

### Приложение

ЦИТРИКАДЕЗ (разтвор 20% или 50%) е предназначен за химио-термо дезинфекция (комбинация от химична и термична дезинфекция) на машини за хемодиализа с циркулация.

След всяка направена хемодиализа хидравличната система на машината трябва да бъде дезинфекцирана с декалцифициращ дезинфектант, който да отстрани натрупаните калцификати и патогенни микроорганизми. В противен случай работата на оборудването за хемодиализа може да се влоши в следствие от натрупването на бикарботани от използваните концентрати.

### Свойства

ЦИТРИКАДЕЗ (разтвор 20% или 50%) е течен концентрат базиран на лимонена киселина. Притежава бързо гермицидно действие в ниски концентрации и комбинира дезинфекция и декалцификация в един процес.

ЦИТРИКАДЕЗ (разтвор 20% или 50%) не съдържа силно-опасни съставки. Безопасен е за ползване и е безвреден за околната среда.

Външен вид: бистра жълтеникава течност

Плътност:

20% разтвор	1.078 – 1.081 g/cm <sup>3</sup>
50% разтвор	1.190 – 1.210 g/cm <sup>3</sup>

**Състав на препарата** - 100g ЦИТРИКАДЕЗ съдържат:

#### Активни съставки:

20% разтвор – 20 g Лимонена киселина (безводна CAS 77-92-9 или монохидрат CAS 5949-29-1)  
50% разтвор – 50 g Лимонена киселина (безводна CAS 77-92-9 или монохидрат CAS 5949-29-1)

#### Класификация:

ЦИТРИКАДЕЗ (разтвор 20% или 50%) отговаря на изискванията за химически дезинфектанти на Директива 93/42 ЕЕС за медицински изделия и е класифициран като медицинско изделие-Class IIb.

#### Спектър на действие

Цитрикадез (разтвор 20% или 50%) притежава бактерицидно, фунгицидно, вирусцидно (за вируси с обвивка) и туберкулоцидно действие при температура от 83°C тестван съгласно: EN 14476, EN 14348, EN 14561 и EN 14562.



## Внимание

### Предупреждения за опасност:

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

### Препоръки за безопасност:

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

### Начин на употреба

ЦИТРИКАДЕЗ (разтвор 20% или 50%) е предназначен, да се ползва в центрове за хемодиализа, за почистване, декарлцифициране и дезинфекция на хемодиализни машини.

ЦИТРИКАДЕЗ (разтвор 20% или 50%) трябва да се употребява при стриктно спазване на инструкциите, дадени от производителите на машините за хемодиализа.

ЦИТРИКАДЕЗ (разтвор 20% или 50%) е съвместим с всички хемодиализни машини, произвеждани от световно известни производители, които използват работни разтвори на лимонена киселина (20% или 50%) при високи температури и експозиционно време от минимум 15 мин.

Цитрикадез (разтвор 20% и 50%) се прилага в работна концентрация: 6% за Citricadez 50% и 15% за Citricadez 20%). Време за експозиция -15 мин.

## Внимание

ЦИТРИКАДЕЗ (разтвор 20% или 50%) е предназначен за ползване само в специализирани здравни заведения за хемодиализа. Да се използва за почистване, декарлцификация и топлинна дезинфекция на апарати за хемодиализа, стриктно съгласно инструкциите предоставени от производителите на апаратите за хемодиализа!

ЦИТРИКАДЕЗ (разтвор 20% или 50%) не трябва да влиза в контакт с очите. Ако това се случи промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате и потърсете медицинска помощ.

ЦИТРИКАДЕЗ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!

### Условия на съхранение

В добре затворена оригинална опаковка, на сухо, хладно и добре проветряемо помещение, далеч от храни и напитки, при температура от 5 - 30°C. Да не се съхранява в метални контейнери. Да се съхранява далеч от силно алкални и оксидиращи препарати. Да се пази далеч от обсега на деца.

**Опаковка:** Туби (HDPE) от 5 L и 10 L

**Срок на годност:** 2 години

### ЖИВАС ООД

1592 София, бул. „Асен Йорданов“ №14  
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507  
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com